



Manuale d'Uso

SLEEPON

▶ Guida Rapida

Avviso Importante

Sebbene il dispositivo GO2SLEEP sia basato su principi scientifici e ricerche sulla fisiologia e sulla cognizione umana, questo non è un dispositivo medico. Prodotto conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Contenuto della Confezione

GO2SLEEP	×1
Anello di Supporto in Silicone	×3
Caricabatterie	×1
Cavo USB	×1
Manuale d'Uso	×1

Contenuto della Confezione



GO2SLEEP



Caricabatterie



Manuale d'Uso



Cavo USB



Anello di Supporto
in Silicone – Taglia S






Anello di Supporto
in Silicone – Taglia M



Anello di Supporto
in Silicone – Taglia L

Conoscere Meglio GO2SLEEP

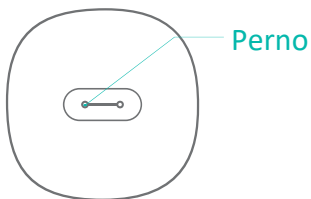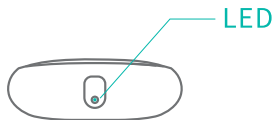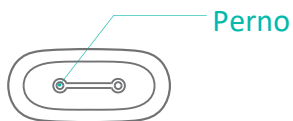

Passaggio 1

Scegliere il supporto in silicone appropriato

Prendere il dispositivo GO2SLEEP, scegliere l'anello di supporto in silicone della giusta misura ed inserire GO2SLEEP.



L



M




S

Passaggio 2

Collegare il caricabatterie alla presa elettrica


Connettere il caricabatterie al cavo USB, poi connetterli alla presa elettrica.

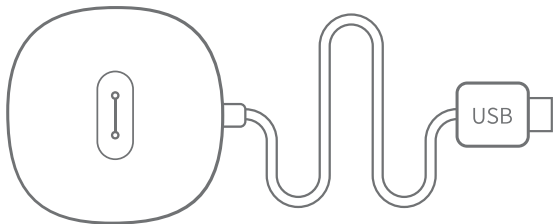

Passaggio 3

Avviare/Ricaricare GO2SLEEP

Quando si utilizza GO2SLEEP per la prima volta, il dispositivo va messo in carica inserendolo come mostrato nell'immagine di seguito. Non appena la lucina rossa lampeggia, indica che il dispositivo è stato attivato in modo corretto ed è in carica. Una volta che il dispositivo è completamente carico la lucina rossa diventerà Verde.

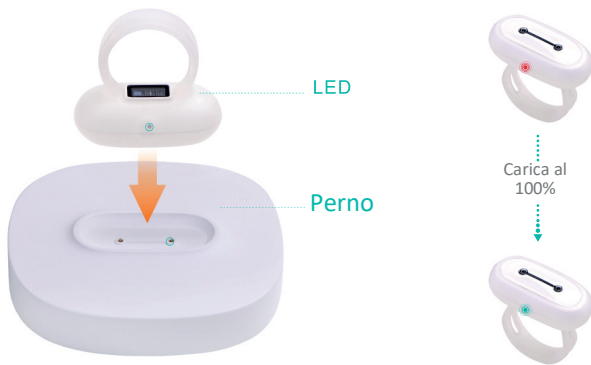

Passaggio 4

Scaricare l'APP SLEEPON

Dispositivo Android: Cercare “SLEEPON” in Google Play. Premere sull'icona SLEEPON e selezionare “Installa”.

Dispositivo iOS: Cercare “SLEEPON” nell'Apple Store. Premere “Ottieni” per scaricare.



SLEEPON

Riposo Migliore, Miglior
qualità di Vita




OTTIENI

Passaggio 5

Connettere GO2SLEEP


Aprire l'app e premere "Join SLEEPON" per essere guidati attraverso una serie di domande che servono a creare il proprio account SLEEPON, o effettuare il login al proprio account se già esistente. L'app riconoscerà automaticamente l'anello. Se il dispositivo si è connesso con successo si accende una luce verde e l'anello emette una vibrazione.

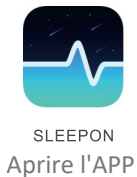

Passaggio 6

Indossare Correttamente GO2SLEEP

Indossare l'anello sul dito esattamente come mostrato sull'immagine in basso, le luci del sensore continueranno a lampeggiare.

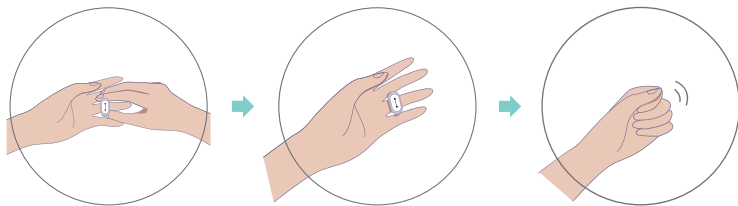

Iniziare ad Utilizzare il Dispositivo

Quali sono le caratteristiche di GO2SLEEP?


Prima di andare a letto indossare l'anello al dito, GO2SLEEP inizierà a monitorare il battito cardiaco e le fasi di riposo durante il sonno.



Report del Riposo

Il Report del riposo può essere visualizzato all'interno dell'app SLEEPON. Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente i report saranno disponibili nell'APP.

*Si consiglia di navigare all'interno dell'APP di SLEEPON per maggiori informazioni.

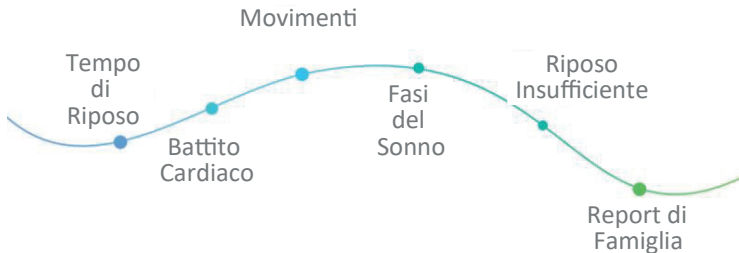

Dichiarazione FFC:

Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 del regolamento FFC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.

(2) Questo dispositivo è destinato ad accogliere qualsiasi interferenza ricevuta, incluso le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Avvertenza:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità del prodotto possono annullare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Sezione 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono designati a provvedere una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un edificio di tipo residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare frequenza radio e, se non installata e utilizzata seguendo le istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. In ogni modo, non vi è garanzia che interferenze non occorranò in una specifica installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze alla ricezione di radio e televisione, che può essere determinata dall'accensione e spegnimento dell'attrezzatura, si consiglia di provare a correggere l'interferenza seguendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o rilocalizzare l'antenna ricettiva.
- Incrementare la separazione tra il ricevitore e l'apparecchiatura.
- Collegare l'attrezzatura in una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto di Radio/TV per un aiuto.

Avvertenze RF:

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Aggiornamenti dell'APP

L'App di SLEEPON viene aggiornata regolarmente. Per assicurarsi di beneficiare di ogni miglioramento, è bene assicurarsi di avere il proprio cellulare aggiornato abilitando gli aggiornamenti automatici. Verranno comunque inviate delle notifiche al rilascio di aggiornamenti particolarmente importanti.

Supporto al cliente dopo l'acquisto

Il nostro obiettivo è che GO2SLEEP offra all'utente finale un'esperienza eccellente. La maggior parte dei problemi sono facilmente risolvibili via email. Prima di restituire il prodotto, si consiglia di contattare il distributore.

Prodotto da: SHENZHEN SLEEPON
TECHNOLOGY CO. LTD
Room 303&304, Build 5, Qian Hai
E-Hub NanShan, ShenZhen, China

Made in China

Importato e distribuito da:
Screen Pharma Srls
Via Settevalli, 448 - 06129
Perugia - Italia
www.screenpharma.it

Email: info@screenpharma.it

SCREEN
CHECK TEST

SLEEPON

www.screenpharma.it