

LH

Istruzioni ITA / ENG

Risultato in 3 minuti  
da effettuarsi con urinaMAMMA TEST  
**SCREEN**

Ovulazione

**SCREEN**

MAMMA TEST

da effettuarsi con urina

Risultato in 3 minuti

Istruzioni ITA / ENG

Ovulazione

LH

LOTTO N.

SCADE IL

La data di scadenza si riferisce  
al prodotto conservato integro

LH

**SCREEN**

MAMMA TEST

da effettuarsi con urina

Risultato in 3 minuti

Istruzioni ITA / ENG


Ovulazione

**SCREEN**  
MAMMA TEST


CE 0123



971664370

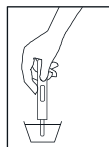**Test monouso.** Facile da usare, risultati in 3 minuti, accuratezza di oltre il 99%. Esclusivamente per uso autodiagnostico in vitro.


1. Rimuovere il dispositivo dalla confezione sigillata ed eseguire il test immediatamente, entro un'ora.
2. Rimuovere il cappuccio dal dispositivo e tenere il test in modo da bagnare la punta assorbente sotto il flusso di urina per 15 secondi. In alternativa, posizionare la punta assorbente del test nell'urina all'interno di un contenitore pulito per 15 secondi.

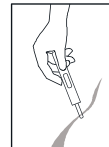

CE REF

MedNet GmbH  
Borkstrasse 10, 48163 Muenster  
Germany

3. Rimettere il cappuccio sulla punta assorbente e posizionare il dispositivo del test su una superficie piana, con le finestre di Controllo e Test rivolte verso l'alto e cominciare a calcolare il tempo.
4. Leggere i risultati a 3 minuti e non interpretarli oltre i 10 minuti.

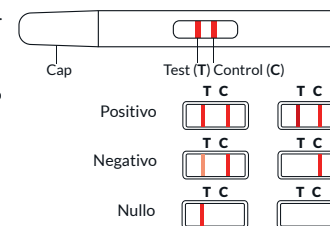

Importato e distribuito da:  
**Screen Pharma Srls**  
Via Settevalli, 448 - 06129  
Perugia - Italia  
www.screenpharma.it

\*Leggere le istruzioni prima dell'uso.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

IVD Test per autoanalisi

