

SCREEN

MAMMA TEST

Prodotto multifunzione, può essere usato come test di gravidanza o di ovulazione.

1 FACILE DA UTILIZZARE

Quando si inserisce lo stick di test all'interno del vano porta stick, il dispositivo riconosce automaticamente il tipo di stick di test inserito.

2 DISPLAY VISIVO

Il risultato del test viene mostrato sullo schermo LCD, il rischio di errore di lettura è ridotto.

3 PREVENZIONE

Per prevenire la contaminazione delle urine, si può scegliere lo stick di test con la cover protettiva.

4 SEGNALE SONORO

Il dispositivo emette un segnale acustico per segnalare l'inizio e la fine del test.

5 DESIGN INNOVATIVO

Il Test Digitale di Gravidanza e Ovulazione possiede molti brevetti, il numero include:

ZL 2012 80000898.1

SCREEN

MAMMA TEST

Test Digitale di **Gravidanza e Ovulazione**
2 stick per test di Gravidanza
7 stick per test di Ovulazione

Istruzioni ITA / ENG



2 Test in 1

GRAVIDANZA & OVULAZIONE

Il Lettore Digitale può essere usato fino a **25 volte**, gli **stick** sono **monouso**. Disponibile la vendita degli stick separatamente.

SCREEN

MAMMA TEST

Test Digitale di **Gravidanza e Ovulazione**
2 stick per test di Gravidanza,
7 stick per test di Ovulazione

Istruzioni ITA / ENG

Gravidanza precoce/
Ovulazione

1 ATTENDIBILE

2 SICURO

3 SEMPLICE DA UTILIZZARE

4 SEMPLICE DA INTERPRETARE

2 Stick Per **TEST DI GRAVIDANZA**
7 Stick Per **TEST DI OVULAZIONE**

Il Lettore Digitale può essere usato fino a **25 volte**, gli **stick** sono **monouso**. Disponibile la vendita degli stick separatamente. Le ricariche sono disponibili solo online al sito www.screenpharmashop.com comunicando il numero del lotto del dispositivo al momento dell'ordine.

LOT





La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato integro

Istruzioni ITA / ENG
Test Digitale di
Gravidanza e Ovulazione
MAMMA TEST
SCREEN

SCREEN

MAMMA TEST

Il test Digitale di Gravidanza e Ovulazione permette di individuare Ovulazione e Gravidanza anche in stadio precoce.

1 ESTRARRE LO STICK DI TEST

Lo stick di test HCG (per il test di gravidanza precoce).
Lo stick di test LH (per individuare l'ovulazione).

2 ESEGUIRE IL TEST

Inserire lo stick di test all'interno del vano porta stick fino a sentire un "click" che ne indica il corretto inserimento, inserire l'estremità dello stick di test, alloggiato nel dispositivo, nel campione di urine per 5 secondi.

3 ATTENDERE 5 MINUTI

Il simbolo **HCG** o **LH** continuerà a lampeggiare per mostrare che il test sta lavorando.

4 LETTURA DEL RISULTATO

Una volta che il lettore emette il segnale acustico "beep-beep-beep", viene mostrato il risultato sullo schermo.

HCG+ = Incinta **HCG-** = Non incinta

 0197

LH+ = Picco di **LH**, se si hanno rapporti entro le prossime 24-48 ore, si aumentano le possibilità di rimanere incinta.

LH- = Non rilevato un aumento di **LH**.
Ripetere il test alla stessa ora il giorno seguente.


AVVERTENZE:

Per individuare quando iniziare ad utilizzare il test di Ovulazione, leggere le istruzioni all'interno della scatola. Il dispositivo è adatto ad essere utilizzato dalle donne in età fertile che vogliono massimizzare le probabilità di rimanere incinta. Tramite l'utilizzo dell'urina è in grado di individuare con lo stick di test LH il picco di fertilità mentre utilizzando lo stick di test HCG rileva in maniera precoce la gravidanza.

 Tianjin HUAC Healthcare Technology Co., Ltd.
No.4 Haitai Huake Street, Huayuan Industrial Park
(anello esterno), Binhai Hitech Zona di Sviluppo Industriale,
Tianjin, 300380 R.P. Cina. Assistenza: 400-651-0200
hiip://www.huac-healthcare.com

  Brückenkopf GmbH
Poller Kirchweg 65 51105 Köln
DIMDI Code: DE/0000045358
Tel: +49 (221) 78993003
Fax: +49 (221) 75927156
www.brueckenkopfgmbh.de

Importato e distribuito da:
Screen Pharma Srls
Via Settevalli, 448 - 06129
Perugia - Italia
www.screenpharma.it

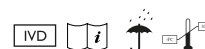

975973278